

**Рекомендации к направлению материала от людей, погибших от бешенства
(предположительно от бешенства)**

Отобранный секционный материал (кусочки мозга размером от 2 см³ из области аммонова рога, коры, продолговатого мозга и мозжечка), помещают в подписанные (пронумерованные) флаконы с винтовой крышкой, содержащие стерильный 50% р-р глицерина на физрастворе.

Отбор клинического материала осуществлять в соответствии с МУ 4.2. 2839-11. Материал хранится и транспортируется при температуре от - 20°С и ниже.

Флаконы с материалом должны быть герметизированы, упакованы и транспортированы в соответствии с СанПиН 3.3686-21.