

**Рекомендации к направлению положительного материала от животных для  
молекулярно-биологического мониторинга вирусов бешенства**

Материал (кусочки мозга размером от 1-2 см<sup>3</sup>) от каждого животного помещают в индивидуальный подписанный (пронумерованный) флакон с винтовой крышкой, содержащий стерильный 50% р-р глицерина на физрастворе. Отбор материала и экспертизу проводят в соответствии с ГОСТ 26075-2013. Материал хранится и транспортируется при температуре от - 20°С и ниже.

Флаконы с материалом должны быть герметизированы, упакованы и транспортированы в соответствии с СанПиН 3.3686-21.